



Scarban®

Professional Scar Treatment

Dziesięć kroków do pięknej blizny



Krok 1

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi

Krok 2

Delikatnie oczyść okolicę blizny, a następnie osusz.



Krok 3

Odklej folię ochronną od powierzchni czynnej opatrunku

Krok 4

Przyklej opatrunek na bliznę, tak aby zachować minimum 1 cm odstępu, pomiędzy brzegiem blizny a brzegiem opatrunku



Krok 5

Możesz dowolną ilość razy zdejmować opatrunek, np. kiedy zamierzasz poćwiczyć, lub wziąć prysznic


Krok 6

Raz dziennie umyj opatrunek za pomocą załączonego hypoalergicznego mydła. Spłucz dokładnie pod bieżącą wodą



Krok 7

Pozostaw opatrunek do wyschnięcia aktywną stroną do góry. Mokry opatrunek zwinie się w rulon jak widać na zdjęciu

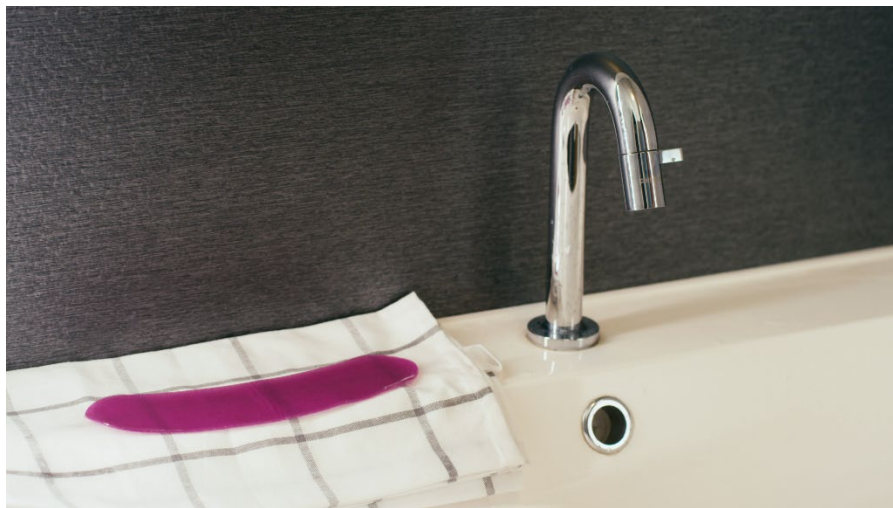

Krok 8

Opatrunek po wyschnięciu sam się wyprostuje.

Nigdy nie wycieraj aktywnej powierzchni opatrunku!!!

Krok 9

Możesz ponownie przykleić opatrunek.

Scarban zachowuje pełne właściwości terapeutyczne przez okres 6-8 tygodni



Krok 10

Stosuj Scarban codziennie przez 20 godzin.

Nie przerywaj terapii.

Czas leczenia trwa minimum 3 miesiące dla świeżych blizn i 6 miesięcy dla utrwalonych.

Ponieważ każda blizna wymaga troski!

Producent



Laan van de Maagd 119
7324 BT Apeldoorn
Niderlandy

Autoryzowany dystrybutor

Młynarska 42 / 115,
01-171 Warszawa,
Polska



+48 508 221 983 • mail: bok@quadropharm.pl • www.quadropharm.pl